

Snap Core First - Développement systématique des mots de base

Progression centrée sur la taille des grilles

Choisissez une taille de grille qui permet à la personne de sélectionner les mots avec précision et efficacité. La grille contiendra les mots et les fonctionnalités listés ci-dessous.

Utilisez cet ensemble de mots vous-même, pour produire de nombreux messages tout au long de la journée et pour offrir des opportunités à l'utilisateur de communiquer avec eux. Envisagez d'augmenter la taille de la grille lorsque la personne est en mesure de sélectionner les mots avec précision et efficacité sur la grille précédemment choisie.

Les éléments en *italique* ne sont pas des mots de base, mais un lien vers d'autres mots de base, des listes de mots ou d'autres fonctionnalités qui se trouvent sur la page des mots de base.

Grille	Mots / Fonctionnalités
1X1	vouloir
1X2	pas
2X2	aimer
	encore
2X3	<i>Listes de mots</i>
	<i>Personnel</i>
3X3	aller
	finir
	<i>Description</i>
3X4	je
	tu
	ça
4X4	<i>+ Personnes</i>
	pouvoir
	<i>+ Actions</i>
	<i>Formes de mots</i>
5X5	il
	être
	avoir
	faire
	aider
	et
	de
	<i>Masculin / Féminin</i>
	<i>Petits Mots</i>
6X6	quoi
	qui
	où
	quand
	pourquoi
	<i>+ Questions</i>
	on
	donner
	mettre
	à
	<i>Singulier / Pluriel</i>

Grille	Mots / Fonctionnalités
7X7	que
	le
	rester
	falloir
	lire
	dire
	prendre
	penser
	regarder
	devoir
	trouver
	<i>Date & Heure</i>
	<i>Ponctuation</i>
7X9	essayer
	écouter
	savoir
	venir
	tenir
	sentir
	comprendre
	alors
	avec
	ou
	si
	parce que
	mais
	pour

Grille	Mots / Fonctionnalités
8X10	comment
	un
	manger
	boire
	jouer
	attendre
	en
	chez
	maintenant
	après
	tout
	peu
	autre
	ici
	là
	avant
	<i>Communication</i>